


Maxi Sky 440

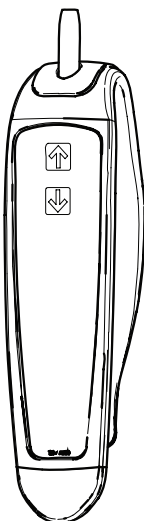


Télécommande



 **Bouton Haut**

 **Bouton Bas**

Panneau de commande

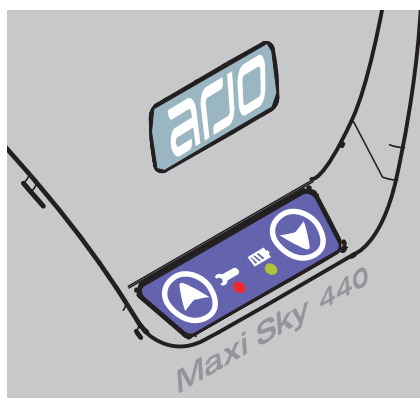

Boutons Haut et Bas

Les boutons Haut et Bas permettent de terminer un transfert en cas de défaillance de la télécommande pendant le fonctionnement.



Entretien requis - Le voyant rouge clignote (sans avertissement sonore) : entretien à effectuer par le revendeur local ; est allumé en continu (avec avertissement sonore) : entretien en retard. Arrêter d'utiliser le lève-personne et contacter le revendeur local pour l'entretien.



Niveau de charge de la batterie - Le voyant jaune clignote : les batteries sont en cours de chargement ; est allumé en continu : les batteries sont chargées.

Frein automatique d'urgence




Risque de chute

Le frein d'urgence est un dispositif de sécurité supplémentaire qui empêche automatiquement le patient de tomber, dans l'éventualité peu probable d'une panne de la transmission ou du moteur.

Le frein d'urgence ne peut être utilisé qu'une seule fois. En cas d'activation de celui-ci, contacter le revendeur Arjo afin qu'il remplace le dispositif. Le système de descente d'urgence ne peut pas être utilisé lorsque le frein d'urgence est actionné. Utiliser un autre dispositif pour faire descendre le patient.

Arrêt d'urgence

1

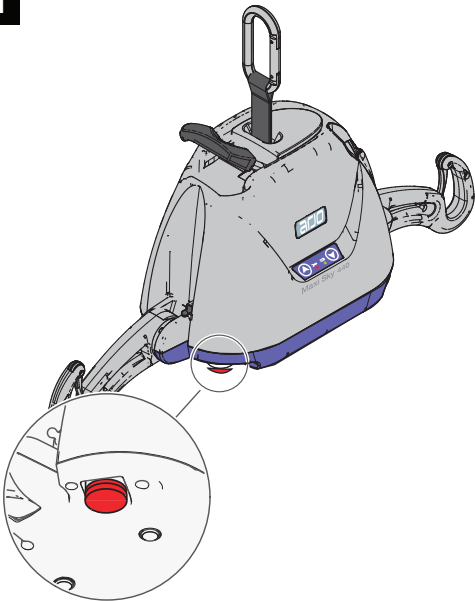


L'utilisateur peut à tout instant couper l'alimentation électrique en appuyant sur le bouton d'urgence rouge en forme de champignon situé sous le lève-personne.

Pour réarmer ce bouton, le faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (dans le sens des flèches).

Avant de faire fonctionner le lève-personne avec un patient, les utilisateurs qui s'en servent pour la première fois doivent s'exercer à effectuer un arrêt d'urgence.


Descente d'urgence

1

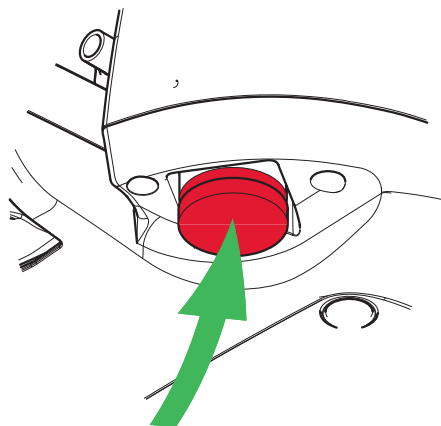


Appuyer sur le bouton rouge d'arrêt d'urgence situé sous le lève-personne. Amener le lève-personne au-dessus du lit ou du fauteuil roulant.

2

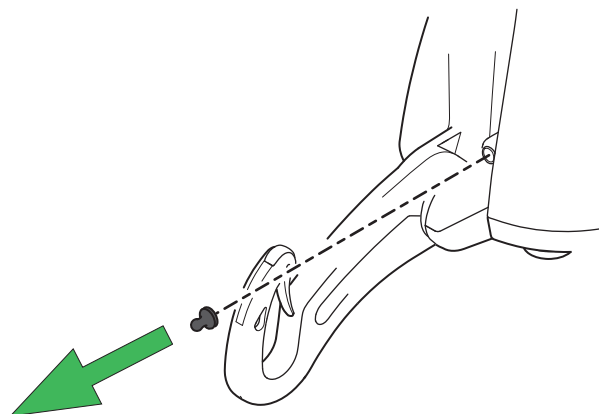

Retirer le capuchon noir en plastique situé sur le côté du lève-personne.

3

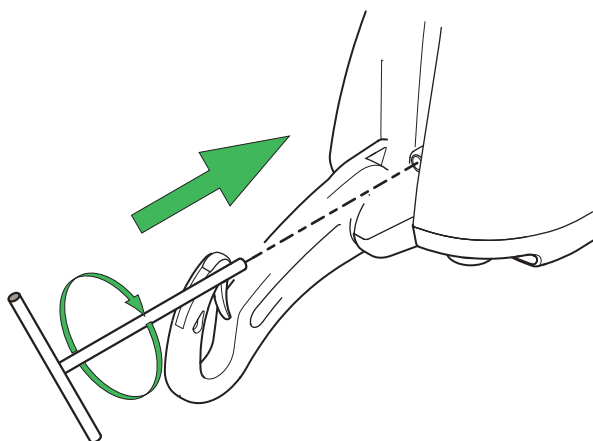

Insérer l'outil spécial dans l'ouverture. Le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire descendre le patient. L'outil fait tourner le moteur directement, de sorte que chaque tour de l'outil abaisse légèrement le patient.

Une fois le patient installé sans encombre sur le lit ou dans un fauteuil roulant, retirer l'outil du lève-personne. Appeler un technicien qualifié pour réparer le lève-personne.